

Bitte beachten Sie: Diese Maske allein schützt nicht ausreichend vor der eigenen Ansteckung mit COVID-19, kann aber verhindern helfen, seine Mitmenschen durch Tröpfcheninfektion (Niesen, Husten usw.) anzustecken. So können wir – durch das Tragen dieser Maske im sozialen Kontakt – einen Beitrag leisten, uns gegenseitig zu schützen.

DERMAPUR®

Mund-Nasen-Maske

- formbarer Nasenbügel
- Grösse ca. 18x10/16 cm
- abkochbar und maschinenwaschbar
- Befestigung durch elastische Ohrbänder
- 100% Baumwolle nach ÖkoTEX 100 Standard

1
Stück



Hygiene-Artikel
wird nach Öffnen
der Packung nicht
zurückgenommen.

Herstellung in Deutschland durch westfälisches Familienunternehmen.
Dieses Produkt ist nicht zertifiziert, medizinisch getestet oder anderweitig geprüft.
Bitte lesen Sie auch die umseitigen Hinweise zur Pflege und zum Gebrauch!

PFLEGEANLEITUNG

Vor der ersten Benutzung sterilisieren Sie die Mund-Nasen-Maske durch 2-minütiges Abkochen. Lassen Sie die Maske danach einfach an der Luft trocknen.

Nach Gebrauch sollte die Maske täglich für 2 Min. abgekocht oder 1 Min. mit 85°C gebügelt werden.

Zusätzlich sollte die Maske 2 x wöchentlich bei 60°C mit Desinfektionswaschmittel oder 1 x wöchentlich bei 95°C mit Feinwaschmittel im Wäschesäckchen maschinell gewaschen werden.

Trocknen: Die Maske ist trocknergeeignet.



GEBRAUCHSHINWEIS

Positionieren Sie die Maske so, dass der eingenähte Nasenbügel oben liegt und fixieren Sie die Maske mit den Ohrgummis.

Der spezielle Edelstahlraht ist **verformbar** und kann durch leichtes Andrücken an Ihren **Nasenrücken angepasst** werden.

Sollten Ihnen die **Gummibänder** für einen optimalen Halt zu lang erscheinen, kürzen Sie diese durch einfaches Knoten, auf die für Sie **passende Länge**.

